

Согласовано

Руководитель ИЛЦ

ФБУН ГНЦ ПМБ

В.М.Самойлов

«07» апреля 2020 г.



Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Рускрафт»

А.Ю.Хейдаров

«07» апреля 2020 г.



Инструкция по применению  
медицинского изделия

**Салфетка дезинфицирующая медицинская СДМ(SDM)  
по ТУ32.50.50.-001-79453704-2021**

# САЛФЕТКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СДМ(SDM) ПО ТУ 32.50.50-001-79453704-2021

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Салфетка дезинфицирующая медицинская из нетканого материала в виде рулонного полотна с линией перфорации, равномерно пропитанные дезинфицирующим средством, обеспечивающие одновременную защиту и дезинфекцию поверхностей от всех видов микрофлоры (далее – СДМ).

**Салфетки СДМ** разрушают на поверхностях биологические пленки; обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий(включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций),вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, полиомиелит, герпес, гепатиты всех видов включая гепатиты А,В и С ВИЧ –инфекция, аденовирус),грибков рода Кандида, Трихофитон. Салфетки обладают высокой прочностью; не оставляют разводов и ворсов на обработанной поверхности; полностью совместимы с материалами медицинского оборудования (кроме подверженных воздействию спиртов).

**Салфетки СДМ предназначены для применения:** в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля (в том числе стоматологических кабинетах, кабинетах диагностики, эндоскопических и колоноскопических отделениях, офтальмологических, приемных, операционных отделениях, отделениях реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, детских стационарах, акушерских клиниках, включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения и населением в быту.

### **Салфетки СДМ предназначены для дезинфекции:**

- небольшого участка поверхности тела перед проведением какой-либо процедуры, обработки кожи перед инъекцией;
- поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала, очистки;
- оптических приборов и оборудования, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами;
- датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.);
- наконечников для клизм, термометров, фонендоскопов;
- осветительной аппаратуры, жалюзи и т.п.;
- наружных поверхностей шлангов гибких эндоскопов и колоноскопов (при условии, что не будет наблюдаться фиксация органических загрязнений);
- для очистки и дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных для обработки твердых непористых поверхностей в помещениях (исключая изготовленные из материалов, подверженных воздействию спиртов).

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Ширина салфетки (Н) 130,0 + - 5,0 Длина салфетки (L) 175,0 +- 5,0 количество салфеток в упаковке 200 шт. Представляют собой влажное равномерно пропитанное полотно из нетканого материала в виде свернутой в рулон перфорированной ленты помещены в банку из плотного полимера с двойными зажимными крышками, внутренняя крышка имеет функциональную прорезь в виде креста. Каждая салфетка пропитана дезинфицирующим раствором в соответствии с ТУ32.50.50-001-79453704-2021, который представляет собой прозрачную жидкость с характерным запахом спирта и применяемой отдушки.

### **СОСТАВ:**

Дезинфицирующий раствор: изопропиловый спирт – 64,0% алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,1%, (ЧАС) полигексаметиленгуанидина гидрохлорид – 0,1%, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, функциональные добавки.

### **СРОК ГОДНОСТИ:**

36 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой упаковке производителя. После вскрытия упаковки срок годности салфеток – 3 месяца в плотно закрываемой упаковке и хранении при комнатной температуре.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Откройте крышку банки, удалите защитную пленку на горловине банки;
- Вытяните первую салфетку из середины рулона, откройте клапан крышки банки;
- Потяните салфетку через отверстие в крышке банки, закройте плотно крышку банки;
- Аккуратно извлеките салфетку и оторвите по линии перфорации, затем плотно закройте клапан крышки банки;
- Проведите очищение, выдержите время до полного высыхания (30 сек).

Возможны побочные действия, аллергическая реакция на отдельные компоненты ввиду не переносимости пациента.

### **ВНИМАНИЕ!**

Нельзя применять дезинфицирующие салфетки для обработки поверхностей, восприимчивых к спиртам (например, акриловое стекло).

Одной салфеткой можно обработать поверхность размером не более 1 м<sup>2</sup>.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Использованное изделие, подлежит утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.7.2790 по классу Б.

Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.7.2790 по классу А.